



Stillhütchen

Gebrauchshinweise

MAM Stillhütchen




Gebrauchshinweise:

Reinigen und sterilisieren: Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch reinigen. Vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang in kochendes Wasser legen. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene. Vor jedem weiteren Gebrauch in warmem Seifenwasser reinigen. Aus Hygienegründen vor dem Sterilisieren gut mit sauberem Wasser abspülen.

Sterilisiermethoden: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle gemäß den Herstellerangaben), Sterilisieren in kochendem Wasser (mind. 5 Min) oder in Sterilisationslösung. Keine aggressiven Reinigungsmittel und NUR weiche Bürsten oder Schwämme verwenden. Besonders vorsichtig reinigen, um Beschädigungen zu vermeiden. In der geschlossenen, sterilisierten Box aufbewahren.

Gebrauchshinweise: Stillhütchen vor jedem Gebrauch überprüfen. Bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln austauschen.

1. Waschen Sie Ihre Hände.
2. Biegen Sie die Flügel um.
3. Platzieren Sie das Stillhütchen auf der Brustwarze und legen Sie die Flügel flach auf.
4. Vergewissern Sie sich, dass es passt und sicher aufliegt, bevor Sie mit dem Stillen beginnen.

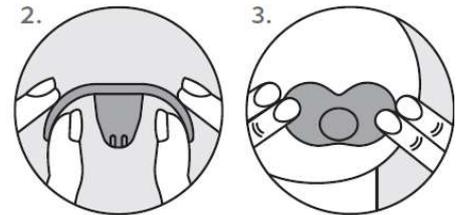

Halten Sie vor der ersten Verwendung, bei Problemen oder Schmerzen Rücksprache mit Ihrer Stillberaterin oder Hebamme.

Warnung – für die Sicherheit ihres Kindes!

MAM Stillhütchen niemals als Schnuller oder Sauger verwenden. Schneiden Sie das Stillhütchen nicht zurecht. Nicht länger als empfohlen in der Sterilisationslösung liegen lassen oder direkter Sonne/Hitze aussetzen. Alle nicht verwendeten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sterilisierbox:

Die Box kann auch als Sterilisierbox für die schnelle und einfache Desinfektion der Stillhütchen in der Mikrowelle verwendet werden. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung auf mambaby.com. **ACHTUNG!** Box, Wasser und Stillhütchen können nach 3 Min Abkühlzeit immer noch sehr heiß sein! Nach dem Mikrowellen-Sterilisieren bleiben Stillhütchen in der ungeöffneten Box für mind. 48 Stunden desinfiziert. Temperatur der Stillhütchen vor dem Gebrauch überprüfen! Inkorrekte Wassermenge, Wattstärke oder Zeiteinstellung können Gerät, Stillhütchen oder die Box beschädigen und zu unzureichender Desinfektion führen! Nur für MAM Stillhütchen geeignet! Sterilisierbox außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchshinweise gut auf.